

โรงพยาบาลชุมชน	ฉบับที่ A แก้ไขครั้งที่ 05	วันที่บังคับใช้ 05/01/64	หน้า 1/1	สำเนาที่ :
วิธีปฏิบัติที่: WI-SUP-01.02		เรื่อง : การใช้เครื่องอบไอน้ำความดันสูง		

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. ปิดวาล์วตัวที่ 1 เพื่อไม่ให้ไอน้ำไหลออก
2. เปิดวาล์วตัวที่ 2 เติมน้ำลงไป ในหม้อต้มน้ำให้เต็มหลอดแก้วที่วัดระดับน้ำแล้วทำการปิดวาล์ว
3. ปิดและล็อกฝาหม้ออบไอน้ำความดันสูงให้แน่นโดยหมุนไปทางขวามือ
4. ปิดวาล์วทั้ง 3 ตัว
5. ตัดไฟเพื่อทำการนี้
6. เมื่อมาตรวัดความดันไอน้ำผนังชั้นนอกถึง 20 ปอนด์/ตารางนิ้ว ทำการเปิดวาล์วตัวที่ 1 เพื่อปล่อยไอน้ำเข้าผนังชั้นใน แล้วทำการนี้และจับเวลา 30 นาที มาตรวัดอุณหภูมิจะขึ้นถึง 121 องศาเซลเซียส และมาตรวัดความดันไอน้ำผนังชั้นนอกและชั้นในจะขึ้น 20 – 28 ปอนด์/ตารางนิ้ว
7. เมื่อครบเวลา 30 นาที ปิดวาล์วตัวที่ 1 และเปิดวาล์วตัวที่ 2 เพื่อปล่อยไอน้ำจากผนังชั้นใน จับเวลา 15 นาที เพื่อทำการอบแห้ง
8. เมื่อครบเวลา 15 นาทีที่ทำการอบแห้ง ปิดวาล์วตัวที่ 2 และเปิดวาล์วตัวที่ 3 แล้วปิดไฟ มาตรวัดทั้ง 3 ตัวจะตกถึงเลข 0 ทำการแย้มประตูเครื่องเล็กน้อย เพื่อให้ไอน้ำจากด้านในออก ปล่อยให้เย็น แล้วนำอุปกรณ์ทางการแพทย์ออกเก็บ

ผู้จัดทำ.....
หัวหน้างานจ่ายกลาง - ชักฟอก	วันที่
ผู้อนุมัติ
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล	วันที่
สถานะเอกสาร	