

โรงพยาบาลชุมชน	ฉบับที่ A แก้ไขครั้งที่ 05	วันที่ประกาศใช้ 05/01/64	หน้า 1/1	สำเนาที่:
วิธีปฏิบัติที่: WI-SUP-01.04		เรื่อง: การเรียกเก็บห่ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่อบนิ่ง เมื่อ Spore test มีผลบวก		

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

เมื่ออ่านผลการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำให้ปราศจากเชื้อของเครื่องอบไอน้ำความดันสูงใน 'แบบบันทึกการทดสอบการทำให้ปราศจากเชื้อโดยใช้ Spore test'(F-SUP-006) เป็นผลบวกหรือไม่ผ่านเจ้าหน้าที่หน่วยจ่ายกลางปฏิบัติ ดังนี้

1. ส่ง 'แบบรายการจ่ายเรียกคืน' (F-SUP-009) ไปยังหน่วยบริการต่าง ๆ เพื่อให้หน่วยบริการต่าง ๆ ได้นำส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่อบนิ่งในหม้อที่ Spore test มีผลบวกกลับคืนยังหน่วยจ่ายกลาง โดยเรียกกลับคืนตั้งแต่วันถัดมาของการทำ Spore test ที่มีผลลบครั้งสุดท้ายก่อนการทำ Spore test ครั้งนี้ (ตัวอย่าง : ทำ Spore test อ่านผลวันที่ 1 มกราคม 2545 มีผลลบ วันที่ 15 มกราคม 2545 แล้วอ่านผลเป็นบวก ให้เรียกเก็บอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2545 เป็นต้นมา)
2. ให้หน่วยบริการต่างๆส่งคืนอุปกรณ์การแพทย์ที่สำคัญ ได้แก่ Set เครื่องมือ OR, Set ผ้า OR, Set สวน Urine, Set เครื่องมือทำคลอด, Set ผ้าคลอด, Set เจาะคอ, Set Cut down, Set เจาะหลัง, Set Chest drain, Set Curretage, Set ใส่ห่วง โดยบันทึกรายการส่งคืนใน แบบรายการจ่ายเรียกคืน และนำส่งหน่วยจ่ายกลางพร้อมอุปกรณ์การแพทย์ที่ส่งคืน
3. เจ้าหน้าที่หน่วยจ่ายกลางจ่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีผลลบให้หน่วยบริการต่างๆตามจำนวน
4. นำอุปกรณ์ทางการแพทย์ทำการอบฆ่าเชื้อ โดยปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติเรื่อง " การทำ Spore test " (WI-SUP-01.01)และวิธีปฏิบัติเรื่อง " การใช้เครื่องอบไอน้ำความดันสูง " (WI-SUP-01.02)
5. ส่ง 'แบบรายการแจ้งอุปกรณ์หีบห่อเมื่อ Spore test มีผลบวก' (F-SUP-014) ให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีการอบนิ่ง
 - 5.1 ให้หน่วยบริการต่างๆทำการเฝ้าระวังในผู้ป่วยที่ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีผลบวก โดยปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเรื่อง การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (SP-ICS-01)

ผู้จัดทำ.....
หัวหน้างานจ่ายกลาง - ชักฟอก	วันที่
ผู้อนุมัติ
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล	วันที่
สถานะเอกสาร	