

โรงพยาบาลชุมชน	ฉบับที่ A แก้ไขครั้งที่ 04	วันที่ประกาศใช้ 05/01/64	หน้า 1/1	สำเนาที่:
วิธีปฏิบัติที่: WI-SUP-01.05		เรื่อง: การจัดเก็บอุปกรณ์หลังจากการทำให้ปราศจากเชื้อ		

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. รถเข็นรับของ Sterile จะต้องทำความสะอาดด้วยผ้าชุบน้ำผสมผงซักฟอก และตามด้วยผ้าสะอาดทุกวันตอนเช้า จึ้นำอุปกรณ์ทางการแพทย์ออกจากเครื่องอบไอน้ำความดันสูง ใส่รถเข็นรับของ Sterile มาฝั่งไว้ให้แห้งในบริเวณที่กำหนดไว้
2. เจ้าหน้าที่จ่ายกลางที่ทำหน้าที่ในการจัดเก็บเครื่องมือ จะต้องสวมเสื้อคลุม สวมหมวก ผูก Mask เปลี่ยนรองเท้า และต้องล้างมือด้วย Water less ทุกครั้งก่อนที่จะทำการหยิบเครื่องมือแพทย์ที่ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อ ก่อนเก็บและก่อนแจกจ่ายให้หน่วยงาน
3. ตรวจเช็คว่ามีกระดาษปิดป้ายและ Autoclave tape มีการเปลี่ยนสีหรือไม่ Set เปียกชื้นหรือไม่
 - 3.1. กรณีที่ไม่พบป้าย จะต้องตรวจสอบดูว่าเป็น Set อะไรแล้วติดป้ายใหม่ ถ้าตรวจสอบไม่ได้จะต้องนำไปเข้ากระบวนการ Pack ใหม่
 - 3.2. กรณีที่ Autoclave tape ไม่เปลี่ยนสี หรือพบว่า Set เปียกชื้น จะต้องนำ Set นั้น ๆ มาเข้ากระบวนการ Pack และนำมาทำให้ปราศจากเชื้อใหม่
4. จัดเรียงหรือจ่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีวันหมดอายุก่อน จากซ้ายไปขวา หรือจากหน้าไปหลัง
 - 4.1. กรณีเรียงเป็นสองหรือสามแถวซ้าย-ขวา ให้จัดหรือแลกรูปลงด้านหน้าซ้ายมือก่อนไป ตามลำดับจนถึงแถวที่ 2 หรือ 3 ให้จัดหรือแลกรูปลงด้านขวามือไปตามลำดับ
5. พนักงานจ่ายกลางที่ทำหน้าที่ในการจ่าย Set จะต้องตรวจสอบดูว่ามี Set หมดอายุในตู้เก็บของปราศจากเชื้อทุกวัน ถ้าพบว่ามี Set หมดอายุจะต้องนำออกมาเข้ากระบวนการ Pack และนำมาทำให้ปราศจากเชื้อใหม่
6. กรณีที่ Set ที่หน่วยบริการอื่น ๆ ฝากนึ่ง เจ้าหน้าที่จะนำไปส่งพร้อมกับ Set ที่หน่วยงานเบิก

ผู้จัดทำ..... หัวหน้างานจ่ายกลาง - ซักฟอก วันที่
ผู้อนุมัติ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล วันที่
สถานะเอกสาร	