

| | | | | |
|-------------------------------|---------------------------|--|----------|------------|
| โรงพยาบาลชุมชน | ฉบับที่ A แก้ไขครั้งที่ 0 | วันที่บังคับใช้ 05/01/64 | หน้า 1/1 | สำเนาที่ : |
| วิธีปฏิบัติที่: WI-SUP -01.06 | | เรื่อง:การใช้เครื่องอบไอน้ำความดันสูง(ระบบไฟฟ้าอัตโนมัติ) Prevacuum | | |

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. ปิดวาล์วถังน้ำต้มด้านซ้ายมือผู้หนึ่ง(ด้านล่างเครื่อง)
2. ปิดฝาประตูเครื่อง
3. ปิดวาล์ว(ปล่อยอากาศเข้าห้องนิ่ง)สีดำด้านหน้าเครื่องนี้
4. เปิดสวิตช์เบรกเกอร์อยู่ในตำแหน่ง ON
5. เปิดสวิตช์(ทำงานของเครื่อง)สีดำด้านหน้าขวามือ
6. เลือกโปรแกรมที่ต้องการโดยกดปุ่มสามเหลี่ยมหน้าจอ กด Set 1 ครั้ง เพื่ออุ่นเครื่อง รอจนแรงดันภายนอกถึง 30 PSIโดยสังเกตที่เกจด้านหน้า(ขวามือผู้หนึ่ง) แล้ว กด Set 1 ครั้งเพื่อเริ่มการทำงานหลังจากนั้น เครื่องจะทำงานอัตโนมัติเมื่อจบการทำงานจะมีเสียงเตือนพร้อมไฟกระพริบ
7. รอจนไฟกระพริบหยุด
8. กด Set 1 อีกครั้ง แล้วกด เลข 5 เครื่องจะPrintกระดาษออก
9. เปิดวาล์วปล่อยอากาศเข้าห้องนิ่ง(สีดำหน้าเครื่อง)ให้อยู่ในตำแหน่งปิด
10. รอจนแรงดันภายใน(Chamber)อยู่ที่ 0 PSI
11. ทำการเปิดประตู แล้วแง้มประตูทิ้งไว้ 5-10 นาทีจึงนำSet sterile ออก
12. หลังจบการทำงานปิดสวิตช์สีดำด้านหน้าเครื่อง(ขวามือ)และเบรกเกอร์ทุกครั้ง
13. เปิดวาล์วปล่อยน้ำของถังต้มด้านล่างเครื่อง(ซ้ายมือ)ทุกวันหลังเสร็จงาน

หมายเหตุ ทุกวันศุกร์ให้ปล่อยน้ำจากถังพักน้ำของชุดVacuumโดยเปิดวาล์วด้านหลังเครื่อง(สีขาว)และเปิดน้ำเข้าหม้อน้ำใหม่เข้าวันรุ่งขึ้น โดยปิดวาล์วสีขาวและเปิดวาล์วสีแดง

| | |
|---------------------------|--------|
| ผู้จัดทำ..... | |
| หัวหน้างานจ่ายกลาง-ซักฟอก | วันที่ |
| ผู้อนุมัติ | |
| หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล | วันที่ |
| สถานะเอกสาร..... | |

| | | | | |
|-------------------------------|--|--------------------------|----------|------------|
| โรงพยาบาลชุมชน | ฉบับที่ A แก้ไขครั้งที่ 0 | วันที่บังคับใช้ 05/01/64 | หน้า 1/1 | สำเนาที่ : |
| วิธีปฏิบัติที่: WI-SUP -01.06 | เรื่อง:การใช้เครื่องอบไอน้ำความดันสูง(ระบบไฟฟ้าอัตโนมัติ) Prevacuum | | | |