

โรงพยาบาลชุมชน	ฉบับที่ A แก้ไขครั้งที่ 01	วันที่บังคับใช้ 05/01/64	หน้า 1/2	สำเนาที่:
วิธีปฏิบัติที่: WI-SUP-01.07		เรื่อง: การป้องกันเครื่องมือ/อุปกรณ์ไม่สะอาด		

ขั้นตอนการปฏิบัติการล้างSyringe

1. แยกตัวSyringe ออกจากไส้Syringe
2. แช่ Syringe ในน้ำยา Enzyme(อัตราส่วน 1: 3) คือ น้ำ 1 ลิตร: Enzyme 3 cc. แช่นาน 10 นาที เพื่อให้คราบเลือด หนองละลายออก
3. ใช้แปรงขัดด้านใน Syringe ใต้น้ำยา Enzyme และ ใช้ฟองน้ำถูด้านนอก Syringeรวมทั้งไส้ Syringe ใต้น้ำยา Enzyme จนสะอาด
4. ล้างด้วยน้ำ โดยเปิดก๊อกน้ำให้น้ำมีแรงดันชะล้าง 3-4 ครั้ง
5. นำไปผึ่งลมให้แห้ง
6. ตรวจสอบสภาพและความสะอาดของ Syringe แล้วห่อด้วยผ้าตามระเบียบปฏิบัติการห่อ Syringe แล้วจึงนำไปหนึ่งทำให้ปราศจากเชื้อ

ขั้นตอนการปฏิบัติการล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์

1. แยกอุปกรณ์ของมีคมออกจากของไม่มีคม
2. ผสมน้ำยาล้างจาน อัตราส่วน น้ำ 20 ลิตร : น้ำยาล้างจาน 100 cc.
3. ใช้สก็อตไบรท์ขัดถูอุปกรณ์ใต้น้ำยาล้างจาน ถ้าคราบสกปรกไม่ออก ให้ใช้น้ำยาขจัดคราบ Spray 1# หรือ Spray 2# ฉีดลงบนคราบสกปรก ทิ้งไว้ 2-3 นาที แล้วขัดออกเบาๆ จนครบออกหมด
4. ล้างออกด้วยน้ำ จนน้ำยาออกหมด แล้วเช็ดให้แห้ง
5. ตรวจสอบสภาพเครื่องมือและความสะอาดอีกครั้ง ก่อนนำไปบรรจุหีบห่อเพื่อส่งหนึ่งทำให้ปราศจากเชื้อ

ผู้จัดทำ.....
หัวหน้างานจ่ายกลาง - ชักฟอก	วันที่
ผู้อนุมัติ
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล	วันที่
สถานะเอกสาร	

โรงพยาบาลชุมชน	ฉบับที่ A แก้ไขครั้งที่ 01	วันที่บังคับใช้ 05/01/64	หน้า 2/2	สำเนาที่:
วิธีปฏิบัติที่: WI-SUP-01.07	เรื่อง: การป้องกันเครื่องมือ/อุปกรณ์ไม่สะอาด			