

โรงพยาบาลชุมชน	ฉบับที่ A แก้ไขครั้งที่ 00	วันที่บังคับใช้ 05/01/64	หน้า 1/1	สำเนาที่
วิธีปฏิบัติที่: WI-SUP-01.09		เรื่อง: การใช้เครื่องอบแก๊สเอทิลีนออกไซด์		

ขั้นตอนการใช้งาน

1. เปิดเบรกเกอร์เครื่องและปิดม
2. เปิดประตูใส่กระป๋องแก๊สและนำของเข้าห้องอบจึงปิดประตู
3. ที่หน้าจอจะขึ้น READY TO START
4. กด START ที่หน้าจอเครื่องจะเริ่มทำงาน
5. เมื่อเสร็จการทำงานหน้าจอขึ้นคำว่า CYCLE SUCCESSFUL
6. หมุนปุ่ม RESET เมื่อต้องการกลับไปยังหน้าหลัก

ผู้จัดทำ.....
หัวหน้างานจ่ายกลาง-ซักฟอก	วันที่
ผู้อนุมัติ
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล	วันที่
สถานะเอกสาร	