

โรงพยาบาลชุมชน	ฉบับที่ A แก้ไขครั้งที่ 00	วันที่บังคับใช้ 05/01/64	หน้า 1/1	สำเนาที่
วิธีปฏิบัติที่: WI-SUP-01.10		เรื่อง: การใช้เครื่องอบแก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสมา		

ขั้นตอนการใช้งาน

1. เปิดประตูนำอุปกรณ์ที่จะอบใส่ในตะกร้าทั้ง 2 ชั้น
2. เปิดเบรกเกอร์ตัวเครื่องขึ้น
3. กดสวิทช์ปุ่ม POWER
4. เลือกโปรแกรมที่จะใช้งาน
5. ช่องใส่หลอดน้ำยาจะเปิดออกโดยอัตโนมัติทำการใส่หลอดน้ำยาลงไปในช่องที่เปิดออกมา
6. กดปุ่ม"ยืนยัน" ที่หน้าจอเครื่องจะทำการตรวจเช็คระบบและเริ่มการทำงานโดยอัตโนมัติ
7. รอหน้าจอแสดงผล และจบขั้นตอนการทำงาน

ผู้จัดทำ.....
หัวหน้างานจ่ายกลาง-ซักฟอก	วันที่
ผู้อนุมัติ
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล	วันที่
สถานะเอกสาร	