

โรงพยาบาลชุมชน	ฉบับที่ A แก้ไขครั้งที่ 00	วันที่บังคับใช้ 28/2/2564	หน้า 1/2	สำเนาที่
วิธีปฏิบัติที่: WI-EMR-01.15		เรื่อง: การใช้เครื่องมือตรวจกล่องเสียงส่องหลอดลมคอ		

1.เตรียมความพร้อมก่อนการใช้งานในแต่ละเวอร์ให้ปฏิบัติดังขั้นตอนต่อไปนี้

- 1.1 ตรวจสอบ Laryngoscope ว่าเป็นชุดเดียวกันหรือไม่
- 1.2 ตรวจสอบถ่านไฟฉายว่าหมดอายุหรือไม่ โดยดูว่ามีคราบเกลือและสารเคมีรั่วซึมออกมาถ้ามีให้เปลี่ยนใหม่ทันที
- 1.3 ดูว่าสปริงในฝาปิดของ Handle ว่าสปริงล้าหรือไม่ ถ้าล้าให้ยืดสปริงขึ้นสองครั้ง
- 1.4 ตรวจสอบความพร้อมของ Laryngoscope โดยวาง Blade บน Handle เป็นมุมฉากใช้หัวแม่มือกดลงเล็กน้อย ดันสลัก Blade ให้เข้าล็อกกับ Handle โยกขึ้น-ลง สองรอบดูว่าหลอดไฟติดหรือไม่
- 1.5 ตรวจสอบความสว่างของไฟโดยใช้มือกำ blade หลวมๆตรวจดูไฟในอุ้งมือถ้าความสว่างน้อยให้เปลี่ยนถ่านทันที
- 1.6 ในกรณีที่ตรวจเช็คเปลี่ยนถ่านแล้วไฟไม่ติดให้ส่งซ่อมทันที ระหว่างที่รอซ่อมให้ติดแต่ละติกโทรประสานเพื่อสำรอง Laryngoscope ดังต่อไปนี้ ตึกผู้ป่วยชายสำรองเครื่องกับตึกผู้ป่วยเด็ก ตึกผู้ป่วยหญิงกับตึกผู้ป่วยพิเศษ ห้องคลอดกับห้องผ่าตัด



2.วิธีการดูแลทำความสะอาดหลังการใช้งานในแต่ละเวอร์ให้ปฏิบัติดังขั้นตอนต่อไปนี้

- 2.1 กด Blade ลงให้เป็นมุมฉาก ใช้ หัวแม่มือดัน Blade ขึ้นเล็กน้อยแยก Blade และ Handle ออกจากกัน
- 2.2 ทำความสะอาด Blade และ Handle ด้วยผ้าหยาบชุบน้ำสบู่อ่อนๆแล้วเช็ดตามด้วย 70% Alcoholทันทีผึ่งให้แห้งแล้วเก็บเข้ากล่องให้เรียบร้อย

3.การดูแลบำรุงรักษาทุก 3 เดือน

- 3.1 การตรวจสอบหลอดไฟว่ามีสนิมหรือไม่โดยการหมุนฐานที่บรรจุหลอดไฟออกจากปลาย Handle หมุนจุกสีดำที่หุ้มหลอดไฟออก หมุนหลอดไฟออกมาตรวจสอบถ้ามีคราบสนิมให้ใช้เข็มเบอร์ 18 สะกิดคราบสนิมออก หรือกระดาษทรายขัดเบาๆส่วนฐานหลอดไฟใช้ไม้พันสำลีเล็กเช็ดในช่องรองหลอดไฟให้สะอาด
- 3.2 หลอดไฟที่ Blade บำรุงรักษาดูฝาตรงหลอดไฟว่ามีหรือไม่ถ้ามีให้ใช้ผ้าหยาบหรือกระดาษทรายขัดเบาๆ

โรงพยาบาลชุมชน	ฉบับที่ A แก้ไขครั้งที่ 00	วันที่บังคับใช้ 28/2/2564	หน้า 2/2	สำเนาที่
วิธีปฏิบัติที่: WI-EMR-01.15	เรื่อง: การใช้เครื่องมือตรวจกล่องเสียงส่องหลอดลมคอ			

ผู้จัดทำ..... 28/2/2564.....
หัวหน้างานการพยาบาลอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน และนิติเวช	วันที่
ผู้อนุมัติ..... 28/2/2564.....
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล	วันที่
สถานะเอกสารเอกสารควบคุม.....	